



31.30 - TECNICA QUIRÚRGICA

# ENDOPROSTESIS DIAFISARIA

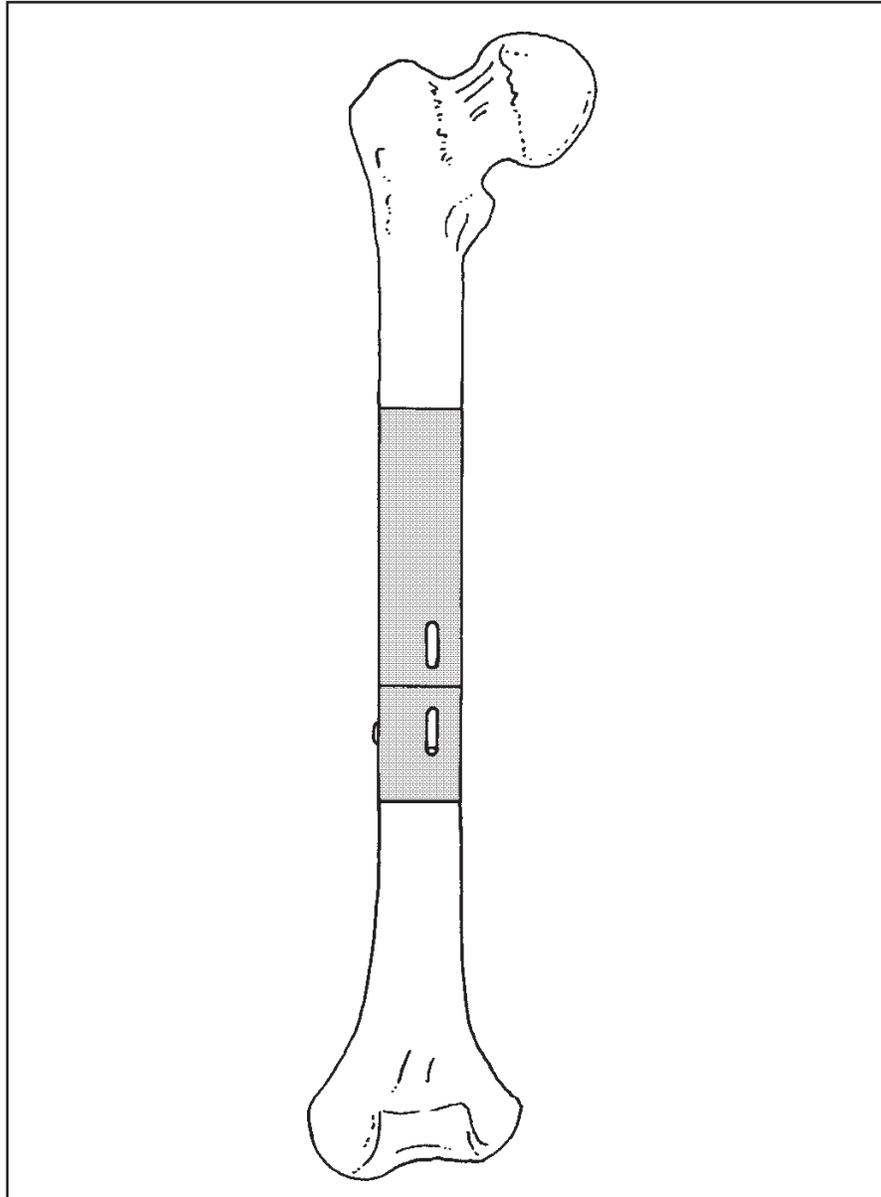

**BAUMER**  
**ORTOPEDIA**

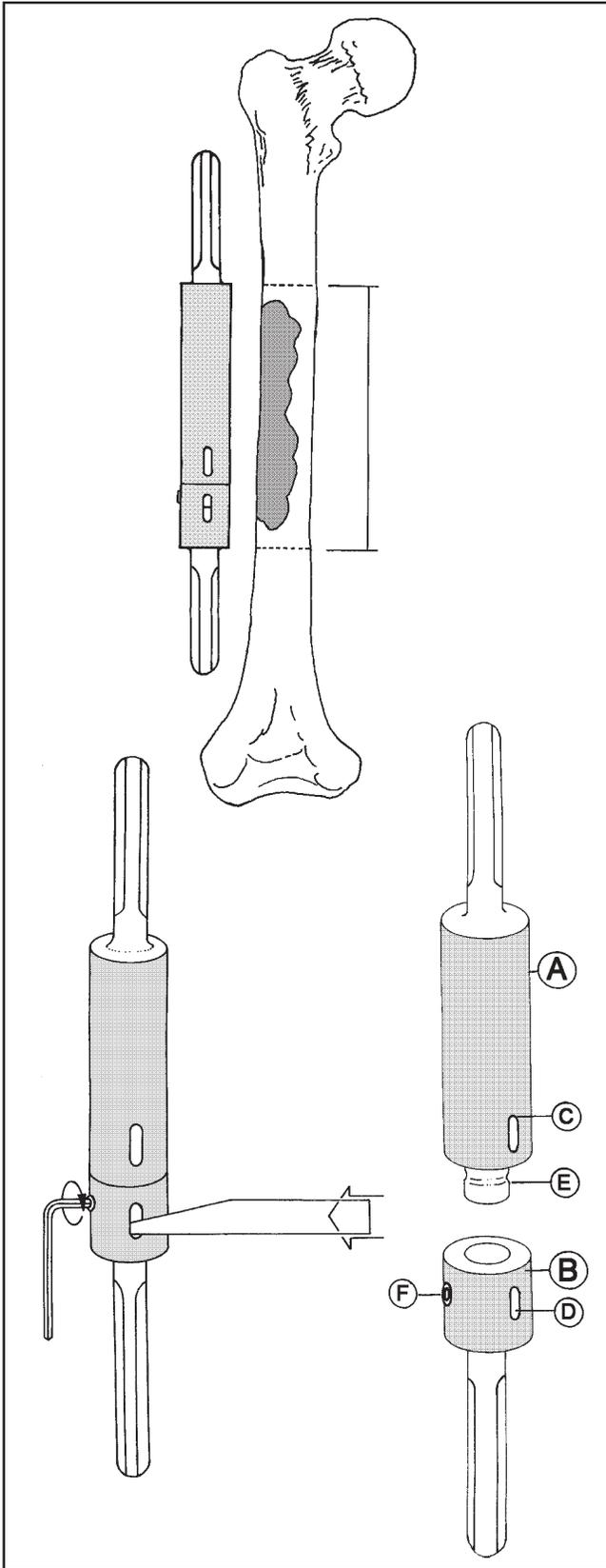

1. Colocar la prótesis al lado del hueso para asegurarse del nivel de resección.

2. Para desarmar la prótesis haga la siguiente operación:

a) Soltar el tornillo de traba con dos vueltas en el sentido anti horario.

(atención: no retire el tornillo completamente).

b) Impactar la cuña 1246-C en el hueco de extracción hasta la prótesis se separar.

3. Detalles de la endoprótesis:

A. Cuerpo proximal


B. Cuerpo distal

C. Agujero de impactación


D. Agujero de extracción

E. Cono

F. Tornillo de traba

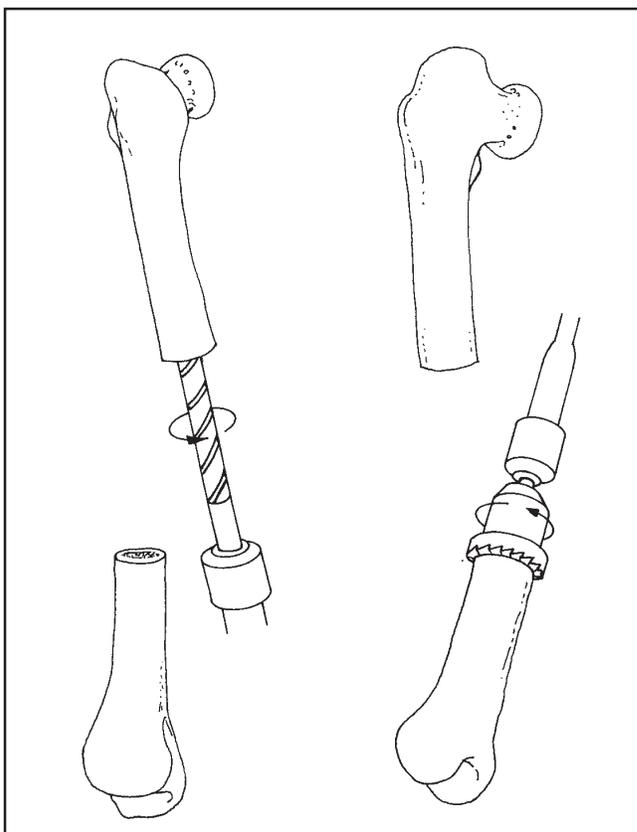


4. Hacer la resección y frezar los canales intramedulares con las frezas diafisarias 8289 sucesivamente hasta el número deseado.
5. Si necesario retificar los niveles de resección con la freza 4303.

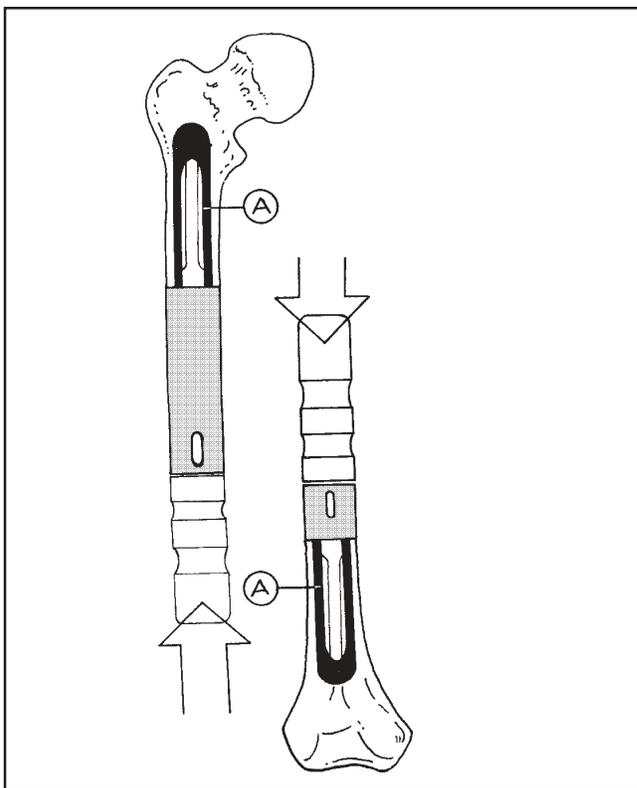

6. Introducir el cemento óseo (A) en el canal intramedular distal y proximal e impactar el cuerpo usando el impactor 3111.

## 31.10 TÉCNICA QUIRÚGICA ENDOPRÓTESIS DIAFISÁRIA

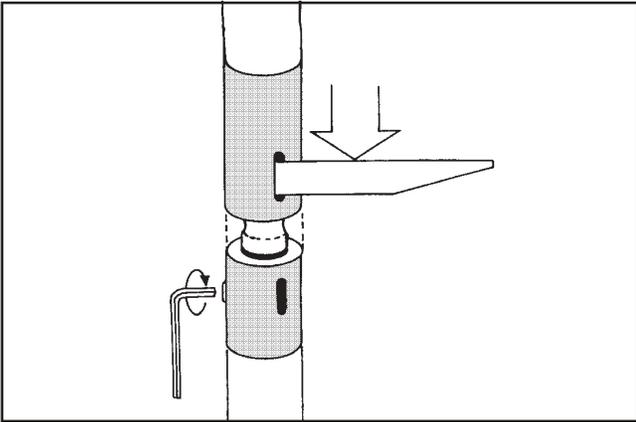

7. Para armar la prótesis haga la siguiente operación:

- A. Reduzir el cuerpo proximal y distal
- B. Impactar el cuerpo distal usando la cuña 1246.c en el agujero de impactación.
- C. Certifíquese que el cono esté travado.
- D. Con la llave hexagonal aprete el tornillo de traba.

