






Primeiro passe, lateralmente, o pino guia 2,0 mm no centro de rotação do cotovelo, isto é, no centro do capitulo (em perfil) e paralelo à articulação do cotovelo (em ântero-posterior).



Posicione o Fixador Externo, lateralmente, introduzindo o pino guia no orifício relativo ao centro de rotação.

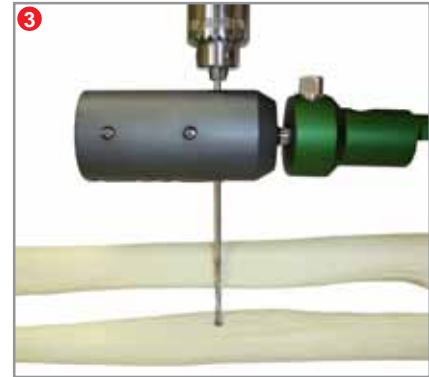


Passes os pinos cônicos 4,5 / 3,5mm na ulna, utilizando broca 2,5mm previamente.



Utilize os protetores de partes moles para broquear e passar os pinos.

Utilize a chave em T para passar os pinos.

ATENÇÃO: Após ultrapassar a segunda cortical, não retorne o pino, devido ao risco de afrouxamento.

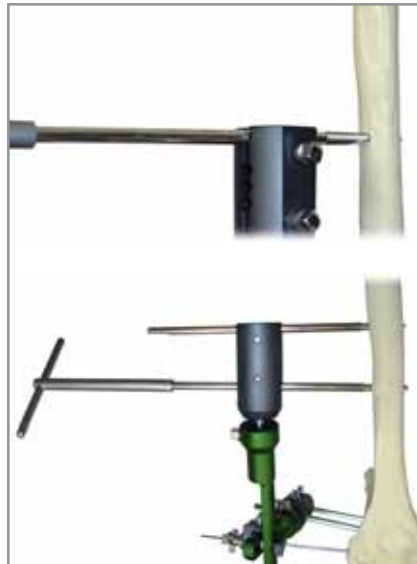

Passes os pinos cônicos 6,0 / 5,0 mm no úmero, utilizando broca 3,2 mm previamente.

Utilize os protetores de partes moles para broquear e passar os pinos.

Utilize a chave em T para passar os pinos.

ATENÇÃO: Após ultrapassar a segunda cortical, não retorne o pino, devido ao risco de afrouxamento.

ATENÇÃO: Para evitar lesão no nervo radial, recomenda-se um pequeno acesso cirúrgico.



Trave o Fixador Externo, inclusive o "clamp" de articulação do cotovelo.



Proceda a artrodiastase, utilizando-se dos **dois** distratores, para evitar impacto anterior e posterior na articulação.



Em caso de utilização do Fixador Externo para rigidez articular, posicione o alongador menor.



Durante a extensão gradativa, este alongador deverá ser trocado pelo maior assim que necessário.



Coloque os protetores de silicone para os pinos cônicos.

O seu fixador externo "CROMUS" articulado para cotovelo está posicionado.
Associe qualquer técnica cirúrgica aberta que for necessário.

LEIA COM ATENÇÃO AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS