







1
Caso o fixador seja colocado para função articulada, primeiro passe o pino guia no centro de rotação da articulação.




2
Introduza o pino de 2,0 mm posicionado na região mais distal do fixador externo. Não há necessidade de bloqueamento prévio. Como este pino não é cônico, ele pode ser "rodado" no sentido inverso.

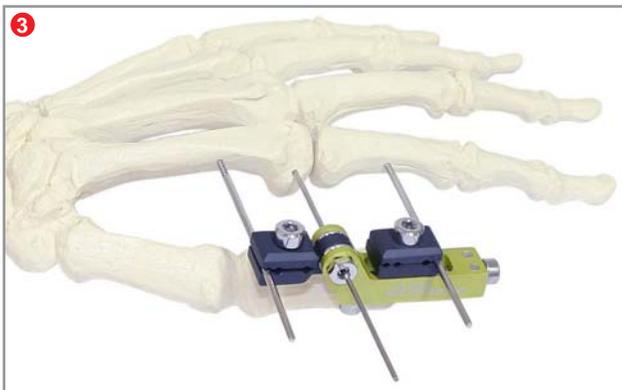


3
Passe o segundo pino de 2,0 mm, utilizando o "clamp" como guia.

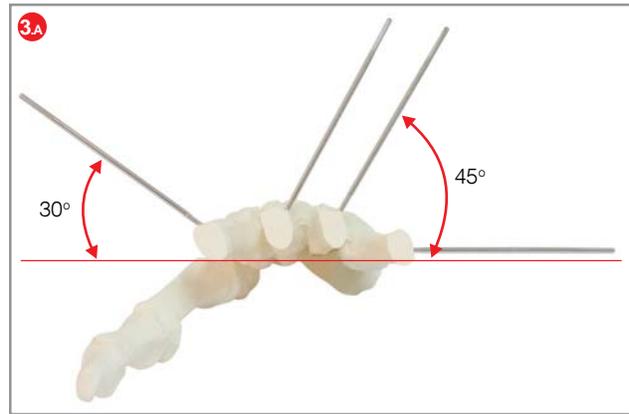

3.A
No caso de introduzir os pinos nos metacarpos, o posicionamento acima é o mais indicado.

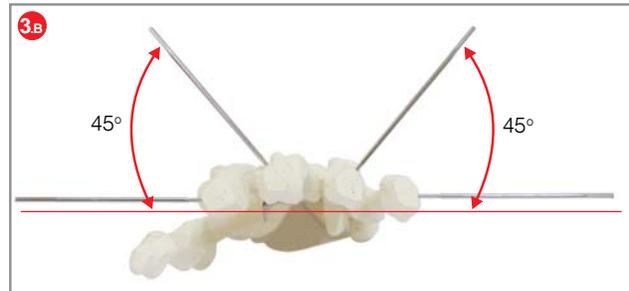

3.B
Caso os pinos sejam introduzidos nas falanges, o posicionamento acima é o mais indicado.

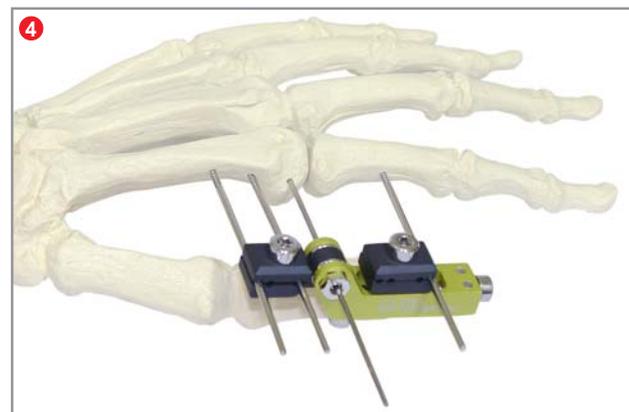


4
Utilize o mesmo procedimento para colocação dos pinos na outra extremidade.

O fixador externo deve ficar cerca de 0,5 – 1,0 cm da pele.



Fixe o clamp proximal e utilize o distal para fazer distração ou compressão em caso de fraturas, ou distração em caso de alongamento.

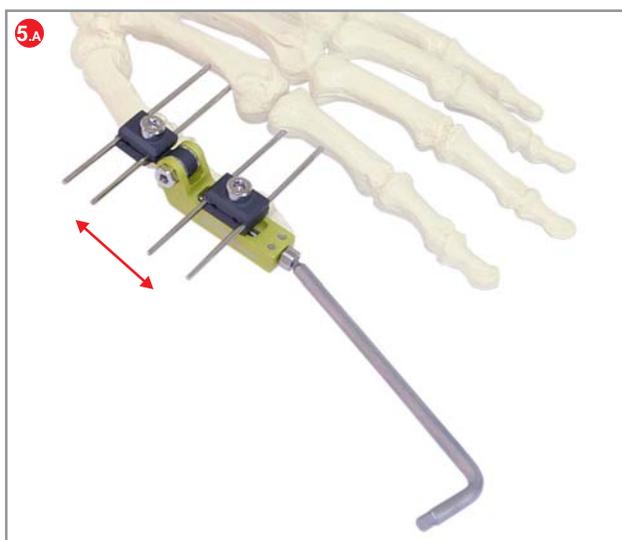

Montagem final.

Mantenha a articulação travada e libere de acordo com cada caso. Associe a técnica cirúrgica apropriada para cada caso.

O seu Fixador Externo "CROMUS" Mini Articulado está posicionado.
Associe qualquer técnica cirúrgica que for necessário.

LEIA COM ATENÇÃO AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS



Gi. Bi. S.a.s. Di Biseгна Tatiana
Via di Villa Braschi, 101 - Tivoli - Roma - Italy
P. IVA 05513261005 - 39 0774 33 3997